

TST-SP-7203 COMPRESA DE GEL CON CUBIERTA DE NYLON Y PVC



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de gel con diseño rectangular.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 31 cm. x 17 cm.

Con cubierta durable de Nylon y PVC (Policloruro de Vinilo o Cloroetileno)

Producto de Gel No Tóxico.

USOS

Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.

Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.

Por su tamaño es perfecta para atender las lesiones musculares de las extremidades.

Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.

Se recomienda su uso para disminuir los dolores de cabeza y musculares, cólicos menstruales, inflamación y dolor provocado por las extracciones dentales, en caso de fiebre, sangrado de la nariz, así como en pequeñas quemaduras.

Si se mantiene en el refrigerador, estará lista para utilizarse en cualquier momento. Debe mantenerse en el congelador al menos dos horas para aplicar terapia fría, sacándola 5 min., antes de ser utilizada.

Para la terapia con calor, debe ser sumergida en agua caliente entre 7 y 10 min. , si está a temperatura ambiente, pero si se encuentra congelada tarda aproximadamente 14 minutos en calentarse.

Para ser calentada en el microondas, es necesario considerar la potencia del aparato y probar por lapsos cortos hasta obtener la temperatura deseada.

Para evitar quemaduras, se recomienda siempre utilizarla envuelta en una toalla.

PUNTO DE VENTA

Permite llevar a cabo terapia fría y caliente con el mismo producto.

Cómoda, flexible y fácil de aplicar a cualquier parte del cuerpo.

Cuenta con certificación internacional, incluyendo: ISO 9001, ISO 13485, GMP, CE, FDA y SGS.

Elaborada por Taiwan Stanch Co., LTD., una empresa dedicada a la creación de compresas de alta calidad y con más de 30 años de experiencia en el mercado